

Vibio pudevibrator

BE1221



Funktioner

Kraftige vibrationer

Vækker selv dem, der sover tungt

Bluetooth®

Den inkluderede App er let at anvende

Smart notifikationer

Notifikation om opkald og beskeder

Snooze-strop

Snooze eller stop med et let træk

Indstil og glem den

Virker selv uden telefon

En behagelig måde at starte din dag.

Uanset om du har brug for at blive vækket dagligt eller bare har brug for en middagslur, så er det let at bruge Vibio. Download Vibio App'en og følg anvisningen for set up - så er du hurtigt i gang.

Appen er tilgængelig i iOS og Android. Når du har indstillet vækketiden i App'en, placeres pudevibratoren under hovedpuden, evt. i pudebe-trækket. Du kan blive vækket med tre forskellige vibrationsmønstre, fra blide til kraftige vibrationer alt efter hvor tungt du sover.

Har du brug for at snooze lidt, kan du trække to gange i stroppen. Indstil Snooze-varighed under indstillinger. Vibio kan også vække dig når din mobiltelefon ringer eller når du mod-tager beskeder (kan fravælges).

Vibio er det perfekte valg til tungt sovende såvel som personer med høretab.



Tekniske specifikationer

Dimensioner og vægt

Pudevibrator

Ø: 94 × 94 mm

Højde: 27 mm


Vægt: 153 g

Snooze-strop

Længde: 120 mm



Knapper og indikatorer

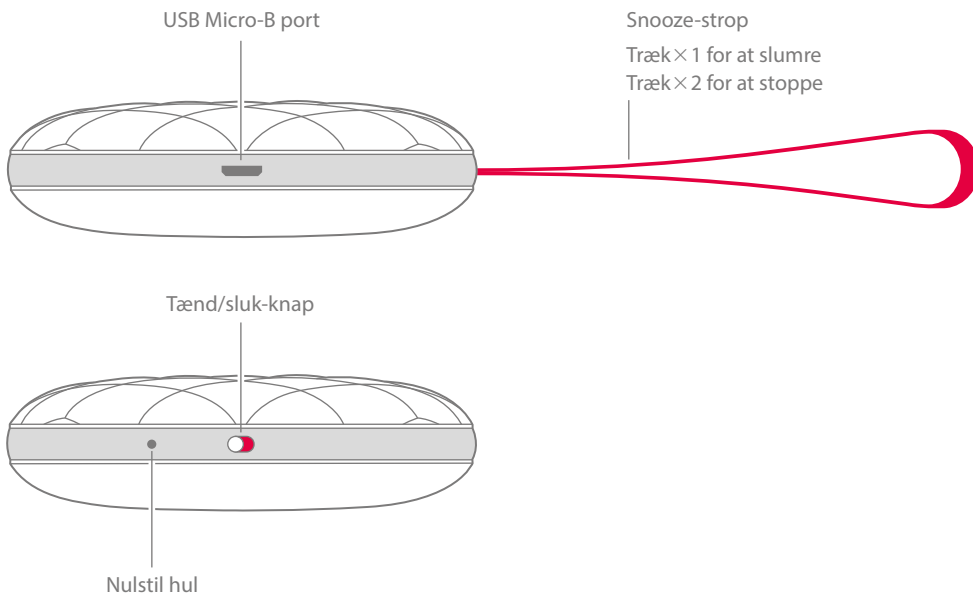

Kompatibilitet

- iOS11 eller Android 4.4 og nyere
- iPhone 6S og nyere
- Moderne Android-telefoner

Frekvens og dækning

- Bluetooth®-frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth® dækning: Op til 30 m, frit felt.

Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth® 5

Strøm og batteri

- Batteristyrke: 1 × 3,7 V AA Lithium-ion
- Strømforsøg:
Aktiv med kraftig vibration: < 1000 mA
Tomgang: < 100 µA
- Driftstid: Op til 60 dage pr. opladning
- Ladetid: Op til 1,5 time ved 500mA
- Ladestrøm: Op til 500 mA, 5V DC

Kabler og forbindelser

- Ledningens længde: 1 m
- Leveres med: USB type A til USB Micro-B

Vedligeholdelse og rengøring

- Vedligeholdelsesfri. Rengør med en tør klud.
- Anvend ikke husholdningsrengøringsmidler, spraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.

I æsken

- Vibio pudevibrator
- Ladekabel
- Brugervejledning til at komme godt i gang (Smartphone medfølger ikke)



© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB.

Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1221_033DSH001-DK

bellman.com