



BigTel 48 Plus Forstærkertelefon



Quick-guide



Original brugervejledning på dansk medfølger pakken



Indholdsfortegnelse

Oversigt over telefonen	1
Kom godt i gang.....	1
Tilslutning af telefonen	2
Vægmontering.....	2
Symboler i displayet.....	2
Ibrugtagning første gang.....	3
Foretage og modtage opkald	3
Telefonindstillinger	6
Fejlsøgning.....	9
Vedligeholdelse/Garanti	10


Oversigt over telefonen

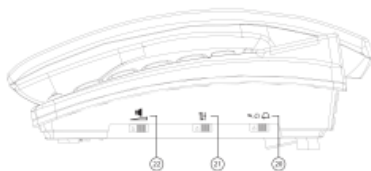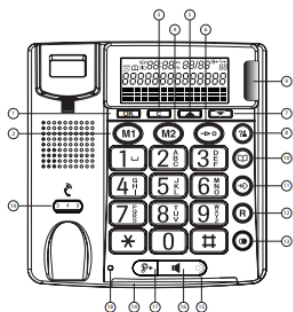


- | | |
|--|---|
| 1. OK-tast | 14. LED-indikator, der indikerer, at telefonen ringer |
| 2. Kviktast M1 | 15. LED-indikator, der indikerer, at højttaleren er aktiveret |
| 3. Slet/Gem | 16. Højttaler-tast |
| 4. Kviktast M2 | 17. Boost-tast |
| 5. Scrolle op | 18. LED-indikator, der indikerer, at boostfunktionen er aktiveret |
| 6. Hurtigkaldstast | 19. Regulering af lydstyrken i telefonrøret |
| 7. Scrolle ned | 20. Regulering af lydstyrken af ringesignalet |
| 8. Opkaldsliste (CID)/Annuller | 21. Regulering af bas/diskant |
| 9. Angivelse af nyt opkald (se side 16) | 22. Regulering af lydstyrken i højttaleren |
| 10. Telefonbog | |
| 11. Gem nummer tast | |
| 12. R-tast | |
| 13. Genkaldstast (til det sidste udgående telefonnummer) | |

Kom godt i gang

Vigtigt: Din telefon kan frembringe meget høj lyd, når boost-funktionen er aktiveret. Vær forsigtig, hvis telefonrøret bruges af andre.

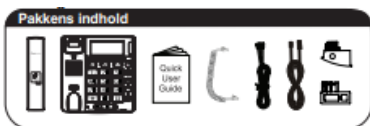

Tilslutning af telefonen

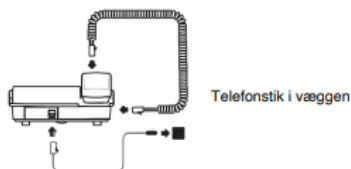



Vægmontering

Telefonen kan også installeres på en væg. Du skal bruge to skruer for at fastgøre telefonen på væggen.

Bor to huller, hvis afstand svarer til det beslag, der skal bruges, indsæt skruerne, og lad dem stikke 5 mm ud fra væggen.

Anbring telefonen på beslaget, før skruerne i åbningerne, og skub telefonen en smule nedad.

Drej krogen (4) i holderen 180°, så telefonrøret kan hænges på.

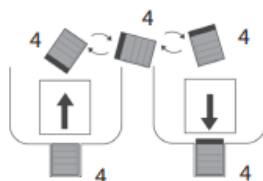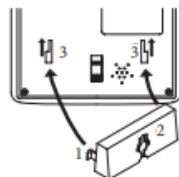

Symboler i displayet

14:45	Visning af tiden
06/11	Visning af datoen.
	Telefonbogen er åben.
CID	Opkaldslisten er åben.
NY	Posten på opkaldslisten er ny.
	Viser et genopkald.
	Positionsnummer på opkaldslisten.
I ALT:XX	Der er XX poster på opkaldslisten.
NYE:XX	Der er XX nye poster på opkaldslisten

Ibrugtagning første gang

Når du har tilsluttet telefonen til telefonlinjen første gang, bliver du bedt om at foretage nogle indstillinger.

Hvis denne indstillingsprocedure afbrydes, f.eks. ved at løfte håndsættet, kan du til enhver tid foretage disse indstillinger (se side 37).

I displayet blinker **ENGLISH** (fabriksindstilling).

Brug ▲ eller ▼ til at vælge det ønskede sprog.

Tryk **C** for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser **LCD KONTRAST**.

Brug ▲ eller ▼ til at ændre kontrasten (1 2 3 4).

Tryk **C** for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser **INDSTIL TID/DATO** med "timer" blinkende.

Indstil timerne ved hjælp af ▲ eller ▼ og tryk på **C**.

Indstil minutterne med ▲ eller ▼ og tryk på **C**.

Indstil dagen med ▲ eller ▼ og tryk på **C**.

Indstil måneden med ▲ eller ▼ og tryk på **C**.

Displayet viser **INDSTIL PAUSETID**.

Brug ▲ eller ▼ til at vælge pausetiden på 1...4 sekunder (om nødvendigt).

Du behøver kun at gøre dette, når du bruger telefonen på en PABX. Du kan finde flere oplysninger på side 38. Tryk **C**. Displayet blinker **FLASH TID**.

Foretage og modtage opkald

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:

- Løft telefonrøret, og indtast telefonnummeret.
- Indtast telefonnummeret, og løft telefonrøret.

Alternativt:

- Du kan indtaste telefonnummeret og trykke 
- Håndfri tilstand aktiveres, og telefonnummeret ringes op i håndfri tilstand.
- Under et opkald kan du se opkaldestiden i displayet.

Afslut et opkald

- læg telefonrøret på, eller alternativt - trykke , hvis opkaldet blev foretaget i håndfri tilstand (den røde lysdiode i højttaler-tasten er tændt).

Besvar et opkald

Løft håndsættet, eller tryk .

Aktivering/deaktivering af håndfri tilstand

Under en samtale, hvor du benytter telefonrøret, kan du skifte til den håndfrie funktion og aktivere højttaleren:

Tryk  og læg derefter telefonrøret på.

Hvis du ønsker at benytte telefonrøret igen, skal du bare løfte telefonrøret igen.

Bemærk:

- Ved brug af den håndfrie funktion bliver din tale overført via mikrofonen på basisenheden. Tal fra en afstand på max 0,5 m fra basisenhedens front.
- Høj baggrundsstøj kan forringe lyd kvaliteten.

Ekstra forstærkning af lydstyrken i telefonrøret

Du kan forstærke telefonrørets lydstyrke op til +40 dB.

Tryk . Lysdioden "ON"  tændt.

Tryk på  igen for at deaktivere ekstra forstærkning.

Advarsel: Denne telefon kan frembringe en meget høj lydstyrke, hvis forstærkeren er tændt, og lydstyrken er indstillet på det højeste niveau. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis telefonrøret anvendes af både personer med normal hørelse og personer med nedsat hørelse.

Indstilling af lydstyrken i telefonrøret

Du kan justere lydstyrken i telefonrøret ved hjælp af volumenkontrollen (19)/ (se "Oversigt over telefonen").

Indstilling af bas/diskant i telefonrøret

Du kan justere telefonrørets tonekontrol ved hjælp af bas/ diskant-skydekontakten (21), mens boost-funktionen er slået til (se "Oversigt over telefonen").

Indstilling af højttalerens lydstyrke

Du kan justere den håndfrie lydstyrke ved hjælp af skydekontakten (22) (se "Oversigt over telefonen").

Sådan anvendes genopkaldsfunktionen

Telefonen gemmer det senest kaldte telefonnummer.

- Løft telefonrøret, eller tryk , og tryk derefter på .
- Eller tryk , og løft derefter telefonrøret, eller tryk .

Sådan returneres et ubesvaret opkald

Telefonen gemmer numrene på indgående opkald på en opkaldsliste. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "opkaldsliste" på side 36.

- Løft telefonrøret, eller tryk . Vælg derefter den ønskede post ved hjælp af  og  tryk OOKO.
- Eller vælg den ønskede post ved hjælp af  og , løft derefter håndsættet, eller tryk .

Ring op til et telefonnummer fra telefonbogen

Se kapitlet "Telefonbog" på side 34 for at få oplysninger om, hvordan du opretter og gemmer telefonnumre i telefonbogen.

- Løft telefonrøret, eller tryk på .
- Tryk , vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af  og  og tryk på 

eller

- Tryk , vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af  og  og løft telefonrøret, eller tryk .

Opkald til et telefonnummer ved hjælp af lynopkald

Se kapitlet "Lynopkald" på side 35 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer lynopkaldsnumre.

- Løft telefonrøret, eller tryk  →
- Tryk  og derefter på hukommelsens placeringsnummer (0... 9).

eller

- Tryk  og derefter på hukommelsens placeringsnummer (0... 9).
- Løft telefonrøret, eller tryk .

Opkald/nødopkald med kviktasterne M1 eller M2

Opkald/nødopkald med kviktasterne kan bruges til at ringe til en nødtjeneste eller til personer, der har brug for hjælp. Se kapitlet "opkald/nødopkald med kviktasterne M1

eller M2” på side 36 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer numre på kviktasterne/nødopkald.

- Løft håndsættet, eller tryk .
- Tryk på kviktasten  eller .

eller

- Tryk på kviktasten  eller .
- Løft håndsættet, eller tryk .

Bemærk: De telefonnumre, der er tildelt en kviktast, kan ikke slettes. Når der gemmes nye numre, overskrives de eksisterende telefonnumre.

Telefonindstillinger

Ringetonens lydstyrke

Du kan justere ringetonens lydstyrke ved hjælp af ringetonens lydstyrketast (20) (se “Oversigt over telefonen”).

Telefonbog

Der kan gemmes 32 telefonnumre og navne i telefonbogen.

- Når telefonbogens hukommelse er fuld, vil meddelelsen **HUKOMMELSEN FULD** fremkomme i displayet, når man forsøger at indtaste yderligere numre. Frigør plads ved at slette et allerede gemt nummer.
- Telefonbogen er organiseret i alfabetisk rækkefølge. Spring til en bestemt kontakt i telefonbogen ved at indtaste det første bogstav i navnet.

Indtastning af et navn

På de numeriske taster er der også bogstaver. Ved at trykke det nødvendige antal gange på en tast kan man enten indtaste tal eller store bogstaver.

Indtast et mellemrum ved at trykke .

Indsæt et specialtegn med * eller #.

Slet et tegn ved at trykke .

Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange, skal du trykke på tasten for at indtaste bogstavet. Vent, indtil markøren springer et bogstav frem. Indtast bogstavet igen.

Tilføj kontakt til telefonbogen

- Tryk .
- Tryk , og bekræft **GEM?** ved at trykke .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .

Rediger kontakt i telefonbogen

- Tryk , og vælg en kontakt ved hjælp af ▲ og ▼.
- Tryk og hold  nede i ca. 3 sek., og bekræft **REDIGER?** ved at trykke .
- Indtast om nødvendigt det nye telefonnummer, og bekræft med .
- Indtast om nødvendigt det nye navn, og bekræft med .

Slet kontakt i telefonbogen

- Tryk , og vælg en kontakt ved hjælp af ▲ og ▼.
- Tryk . Displayet viser **SLET?**.
- Tryk og hold  nede i ca. 4 sek. Kontakten slettes.

Slet alle kontakter i telefonbogen

- Tryk , og vælg en kontakt ved hjælp af ▲ og ▼.
- Tryk på og hold  nede i ca. 4 sek. Displayet viser **SLET ALLE?**
- Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. igen.

Bemærk: Tryk på CID-tasten for at afbryde en indstilling uden at ændre den.

Lynopkald Du kan gemme op til 10 telefonnumre, som kan ringes op via lynopkald.

Programmering af tasterne for lynopkald

- Tryk .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .
- Tryk på den numeriske tast, som lynopkaldsnummeret skal tildeles.

Bemærk: Hvis du vil ringe til et telefonnummer ved hjælp af lynopkalds-funktionen, skal du se på side 36.

Bemærk: De telefonnumre, der er tildelt lynopkaldsnummeret, kan ikke slettes. Når der gemmes nye numre, overskrives de eksisterende numre.

Opkald med hurtigvalgstasten / nødopkald

Du kan anvende tasterne **M1** og **M2** både som hurtigvalgstast og nødopkaldstast. Det er hurtigere og nemmere end at benytte lynopkald og telefonbogen.

Sådan gemmes telefonnumre til hurtigvalgstasterne

- Tryk .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .
- Tryk  eller  for at tildele telefonnummeret til den pågældende tast.

Bemærk: De telefonnumre, der tildeles en hurtigvalgstast, kan ikke slettes. Når nye numre gemmes, overskrives de eksisterende numre.

Opkaldsliste

Bemærk: Vis nummer-funktionen, som er obligatorisk for opkaldslisten, er en ekstra tjenesteydelse, der tilbydes af telefonselskabet. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger. Hvis der er adgang til denne funktion via din tjeneste, vil nummeret og navnet på personen, der ringer, fremkomme på displayet, når telefonen ringer, hvis det er indskrevet i telefonbogen. Hvis personen, der ringer, har hemmeligt nummer, eller det ikke kan ses, vil en tilsvarende meddelelse fremkomme i displayet.

Telefonnummeret kan ikke ses, og det gemmes derfor ikke i opkaldslisten. Der kan gemmes i alt 32 numre i opkaldslisten.

En blinkende rød lysindikator viser, at der er nye opkald på listen. Det ledige display viser, hvor mange elementer der er på opkaldslisten, og hvor mange af disse der er NYE (usete). **Denne lysdiode blinker, så længe der stadig er nye (ikke læste) opkald på opkaldslisten. Tryk gentagne gange på for at få lysdioden til at stoppe med at blinke**

Sådan vises opkaldslistens telefonnumre

- Tryk  eller , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .

Sådan gemmes numre fra opkaldslisten i telefonbogen

- Tryk  eller  og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk , og bekræft **KOPIER NUMMER?** med .
- Nummeret kopieres til telefonbogen. Hvis du vil indtaste et navn for dette nummer, skal du se "Rediger kontakt i telefonbogen", side 35.

Sådan slettes individuelle telefonnumre

- Tryk  eller , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk  Displayet viser **SLET?**
- Tryk på og hold  nede i ca. 4 sek. Posten slettes.

Sådan slettes alle kontakter

- Tryk ▲ eller ▼, og vælg en kontakt ved hjælp af ▲ og ▼.
- Tryk på og hold nede i ca. 4 sek. Displayet viser **SLET ALLE?**
- Tryk på , og hold den nede i ca. 4 sek. igen.

Sådan ændres indstillingerne

Du kan ændre de indstillinger, der blev foretaget, da telefonen blev tilsluttet første gang (se side 9), hvis det er nødvendigt, eller når du tilslutter telefonen til en PABX.

Åbn menuen ved at trykke på og holde ▲ nede i ca. 5 sek.

- Den nuværende indstilling for sproget vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af ▲ og ▼, og tryk , eller tryk blot for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for displayets kontrast vises.
- Skift indstillingen ved hjælp ▲ af og ▼, og tryk , eller tryk blot for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for dato og klokkeslæt vises.
- Skift timer, minutter, dag og/eller måned ved hjælp af ▲ og ▼, og tryk . Eller tryk blot for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for pausetiden vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af ▲ og ▼, og tryk , eller tryk blot for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for flash-tiden vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af ▲ og ▼, og tryk , eller tryk blot for at beholde den nuværende indstilling.

Flashtid: I de fleste situationer bør flashtiden på 100 ms vælges. I nogle tilfælde f.eks. ved tilslutning af en telefon til et PABX-system, kan det være nødvendigt at skifte til 300 eller 600 ms. For yderligere oplysninger, se vejledningen for det pågældende PABX-system.

Fejlsøgning

Jeg kan ikke ringe

- Kontroller, at telefonkablet er tilsluttet korrekt. Er det tilsluttet korrekt, kan der være en fejl. Kontroller, at du bruger det telefonkabel, der fulgte med telefonen.

Jeg hører støj og/eller min internetforbindelse er langsom, når jeg bruger telefonen

- Hvis du har en bredbåndsforbindelse til internettet, skal du kontrollere, at du har tilsluttet kablet til telefonlinjen via et DSL-filter.

Tegnene på displayet er meget svage

- Sørg for, at batterierne er isatte korrekt, er af den korrekt type og ikke er opbrugte. - Undersøg strømforsyningen

Listen over telefonopringninger virker ikke

- Undersøg om dit telefonabonnement har denne tjeneste. Kontakt dit telefonselskab.
- Personen, der ringer op, kan have skjult nummer

Vedligeholdelse/Garanti

Vedligeholdelse

- Rengør telefonens overflader med en blød, fnugfri klud.
- Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Garanti

AMPLICOMMS udstyr er produceret og testet i henhold til seneste produktion metoder. Gennemførelsen af nøje udvalgte materialer og stærkt udviklede teknologier sikrer problemfri funktion og lang levetid.

Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller strømfor-syninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af forkert håndtering, drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for garanti. I tilfælde af reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Indsend dit Amplicomms udstyr sammen med købsfaktura.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Esbjerg

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk